



Go Talk NOW

Go Talk NOW Lite ist eine flexible, funktionale und nutzerfreundliche Einsteiger-App für den Bereich der unterstützten Kommunikation. Die App kann Personen mit biographischer Erfahrung zum Beispiel Texte vorlesen oder Grafiken erkennen und beschreiben. Die App ist konzipiert für nicht-sprechende Menschen. Durch die Betätigung von (Symbol-)Buttons werden Wörter oder Sätze durch das Endgerät wiedergegeben. Es gibt drei unterschiedliche Layouts: Standard-, Express- oder Szenenseiten. Auf den Standardseiten gibt es Symbolbuttons mit vorgefertigten Wörtern und Satzteilen. Wenn diese angeklickt werden, wird die Aussage sofort gesprochen. Über die Expressseiten lassen sich Nachrichten erstellen. Hier werden die Aussagen nicht direkt gesprochen, sondern erst beim Bestätigen der Nachricht. Bei Szenenseiten können Hintergrundbilder mit unsichtbaren Buttons versehen werden, die entweder besprochen oder mit Videos und Musik versehen werden können. ~~Es gibt drei unterschiedliche Layouts: Standard-, Express- oder Szenenseiten.~~

Standardseite:

Wird ein Button auf einer Standardseite gedrückt, wird eine Nachricht sofort gesprochen vorgelesen oder eine andere gewünschte Aktion ausgeführt.

Expressseite:

Auf Expressseiten werden die Buttons zunächst in ein Nachrichtenfenster eingefügt; drückt man dann auf das Nachrichtenfenster, werden alle zuvor eingefügten Buttons im Zusammenhang hintereinander gesprochen vorgelesen.

Szenenseite:

Szenenseiten basieren auf Hintergrundbildern. Über Objekten oder Personen des

Kommentiert [MOU1]: Welche Nachricht? Was sind die Buttons und was sind die Nachrichten????

Kommentiert [MOU2]: Warum soll ich Buttons in ein Nachrichtenfeld tun? Die Funktion der App kommt nicht ganz heraus

Kommentiert [MOU3]: Was bedeutet das?



Hintergrundbildes werden unsichtbare Hotspots angeordnet, die wahlweise sprechen, Videos oder Musik abspielen. Es bietet keine Möglichkeit, Inhalte zu teilen.

Kommentiert [MOU4]: Sehr verständliches Wort.

Kommentiert [MOU5]: Sprechen die Hotspots?

Eine Anleitung ist unter folgendem Link zu finden: [GoTalk-NOW-Handbuch.pdf](#)

([prentke-romich.de](#)) (Hrsg. Go Talk NOW (o. J.))

Formatiert: Nicht unterstrichen, Schriftfarbe: Automatisch

Warum ist die App barriere-sensibel?

- **Sprache:** Die App ist ein Hilfsmittel für computergestütztes Lernen und unterstützte Kommunikation (generierte Sprachausgabe & symbolorientierte Kommunikation).

•

Literaturverzeichnis

Go Talk NOW (o.J.): Go Talk NOW Handbuch. Abgerufen 24. Juni 2024 von <https://www.prentke-romich.de/wp-content/uploads/2018/02/GoTalk-NOW-Handbuch.pdf>

Formatiert: Englisch (Vereinigtes Königreich)

Formatiert: Standard, Zeilenabstand: Doppelt

Formatiert: Deutsch (Deutschland)

Formatiert: Hyperlink, Deutsch (Deutschland)

Feldfunktion geändert